

femibion®

SALUD PARA LA MUJER

Intima

Femibion®, un nuevo concepto de marca para la salud de la mujer, ha desarrollado Femibion® Intima, un gel vaginal que ayuda a restaurar y a mantener el equilibrio natural de la flora vaginal.

Ser mujer es disfrutar de una vida plena, pero, en ocasiones, el organismo se desestabiliza y en estos momentos es cuando necesitas un plus para seguir con tu día a día.

Femibion® Intima es un gel vaginal que ayuda a restaurar y mantener el equilibrio natural de la flora vaginal.

Femibion® Intima contiene una combinación clínicamente probada de prebióticos específicos y extracto de Trébol rojo. Los prebióticos estimulan el crecimiento de las bacterias beneficiosas para el organismo junto con el Trébol rojo. Femibion® Intima proporciona un entorno favorable para las bacterias beneficiosas potenciando la hidratación natural de la mucosa. Femibion® Intima ha sido desarrollado por Femibion®, una gama de productos para la salud de la mujer, con productos específicos para cada una de las etapas de la vida de la mujer.



Gel vaginal que ayuda a restaurar y mantener el equilibrio natural de la flora.



Complemento alimenticio para la mujer desde el momento en que desea tener un bebé y durante el primer trimestre del embarazo.



Complemento alimenticio para la mujer embarazada a partir del segundo trimestre del embarazo y durante el periodo de lactancia.



Complemento alimenticio para mamás con niños pequeños.

Algunos consejos sobre las infecciones vaginales...

Los cambios hormonales del organismo pueden influir en el equilibrio de la flora vaginal. Pueden deberse a factores externos como los medicamentos o las píldoras anticonceptivas con dosis bajas de estrógenos.

Pero algunos factores internos como los niveles de estrógenos reducidos tras la menopausia y el estrés, también pueden provocar un desequilibrio de la flora vaginal.

+ Consejos para contribuir a proteger la flora vaginal

Lleve bragas de algodón y evite el nailon y la licra. El algodón ayuda a absorber la humedad y permite que circule el aire.

Mantenga la vagina limpia pero no se lave el interior de la vagina con líquido. Realizar lavados vaginales de forma rutinaria elimina la mucosa protectora natural de la vagina.

www.femibion.es



femibion®

SALUD PARA LA MUJER

Intima

Gel vaginal en 8 tubos de un solo uso

Instrucciones de uso

Lea detenidamente estas instrucciones de uso. Contienen información importante acerca de lo que hay que hacer cuando se utiliza este producto sanitario. Si tiene cualquier pregunta, consulte a su médico o farmacéutico.

Composición

Oligosacárido alfa-glucano, glicerina, extracto de trébol rojo (extracto de *Trifolium Pratense*, butilenglicol, lecitina, metilhidroxibenzoato, parahidroxibenzoato, sorbato de potasio, tocoferol, ácido cítrico, citrato de sodio, biotina), poli(acrilamida (poliacrilamida, isoparafina C13-C14, Laureth-7), benzoato de sodio, sorbato de potasio, ácido L-láctico, agua purificada. pH fisiológico vaginal.

Mecanismo de acción rutinario

Femibion® Intima gel vaginal contiene un oligosacárido que actúa a modo de prebiótico. En combinación con el extracto de trébol rojo, estimula el crecimiento de las bacterias vaginales beneficiosas para suprimir a las bacterias perjudiciales. Estas bacterias beneficiosas producen esencialmente ácido láctico, que contribuye a mantener o restablecer el ecosistema vaginal sano en las mujeres durante y después de la pubertad. Femibion® Intima también ayuda a hidratar la mucosa vaginal.

Indicaciones

Femibion® Intima es un gel vaginal que está indicado en la prevención del desequilibrio de la microflora bacteriana y en la restauración y el mantenimiento de una microflora bacteriana normal. Especialmente después de un tratamiento antibiótico, Femibion® Intima ayuda a restaurar la flora vaginal normal.

Los cambios de la flora vaginal modifican su pH fisiológico y pueden reducir los mecanismos de defensa naturales y aumentar el riesgo de infección vaginal. Este desequilibrio es responsable de varios síntomas como, por ejemplo: quemazón, irritación, flujo vaginal abundante, mal olor, prurito, molestias perineales, etc.

Contraindicaciones

Este producto no lo pueden utilizar las mujeres jóvenes que no han llegado a la pubertad.

Este producto no lo pueden utilizar las mujeres con alergia conocida a alguno de sus ingredientes.

Efectos secundarios

En raras ocasiones, pueden provocarse efectos adversos como picor o quemazón. Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si esto influye en su bienestar. Puede causar reacciones cutáneas locales, levemente irritante para la piel y las mucosas.

Precauciones de empleo

Es aconsejable evitar utilizar un preservativo, espermicida, diafragma de látex o cualquier otra forma física de anticoncepción al utilizar este gel (riesgo de rotura o ineficacia).

El producto no debe utilizarse durante la menstruación.

Consulte a su médico si sus síntomas empeoran o no mejoran al cabo de 8 días.

No utilice el producto si la dosis única no está intacta.

Este producto es de aplicación única y no se puede reutilizar. (Si se reutiliza el producto puede aparecer una infección).

Embarazo y lactancia

Este producto no lo pueden utilizar mujeres embarazadas, pero si pueden utilizarlo con seguridad mujeres lactantes.

Método de aplicación y posología

Agite el tubo para que el gel suba hacia su parte superior. Abra el tubo en el lado indicado del punto de rotura. Después sitúese en una posición en la que esté cómoda, introduzca suavemente el tubo en la vagina y apriételo para que fluya el gel. De esta forma el gel llegará a la zona deseada. No deje de apretar el tubo antes de sacarlo de la vagina.

Security code
ITF Variable

F308313
7F03190.0005es

Es aconsejable lavarse siempre las manos antes y después de aplicar el producto.


Aplique una dosis al día durante 8 días seguidos en la vagina, empezando el día después del final de la menstruación. Se recomienda utilizar el gel antes de irse a dormir.

Cada tubo corresponde a una única aplicación. ☒

Para un resultado prolongado, se recomienda renovar cada mes el tratamiento de 8 días durante un periodo de 3 meses.

Información adicional

Conservar entre 0°C y 30°C. 0°C ↕ 30°C

No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y cada dosis única al lado del símbolo 

El código de lote se indica en el tubo al lado del símbolo

LOT

Mantener fuera del alcance de los niños.

Caja con 40 g de gel vaginal en 8 tubos de un solo uso.



Fabricante
Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goepfert-Str. 1,
D-23562 Lübeck

Distribuidor:

Merck, S.L.
María de Molina, 40, 28006, Madrid

CE 0482

Fecha de la última actualización: octubre 2010

